



Syphilis
diagnostics direct : **Health Check™**
The New Direction in Diagnostics

INFORMACIÓN QUE DEBE CONOCER SOBRE LA SÍFILIS,
Y EL METODO USADO PARA EL EXAMEN DE LA SIFILIS.

EL EXAMEN SE LLAMA: DIAGNOSTICO DIRECTO DE LA
SIFILIS CHEQUEO DE LA SALUD.

Es muy importante que lea este folleto antes de hacerse la
prueba de sífilis

Este folleto le proporcionará la siguiente información:

- ¿Qué debe saber antes de hacerse la prueba de sífilis?
- ¿Qué debe saber sobre la sífilis?
- ¿Cómo puede infectarse con sífilis?
- ¿Cómo se puede evitar la infección por sífilis?
- ¿Por qué debería hacerse una prueba de sífilis?
- ¿Qué debe saber acerca de sus opciones para la prueba de sífilis?
- ¿Qué debe saber sobre el examen rápido de salud de la sífilis de Diagnostics Direct?

Prueba de anticuerpos de el treponema (Treponema es la
Espiroqueta /Bacteria que produce syphilis) y como se hace
la prueba.

- ¿Qué debe saber sobre los resultados de su prueba?
- ¿Dónde puede obtener más información sobre la sífilis?

¿QUÉ DEBE SABER ANTES DE QUE SE REALICE LA PRUEBA DE SÍFILIS?

Lea este folleto con atención. Si tiene más preguntas o no
comprende algo, asegúrese de preguntar a su proveedor de
atención médica que se lo explique. El proveedor de atención
médica es la persona más indicada para responder sus pregun-
tas sobre la sífilis. Hay varias opciones disponibles para la
prueba de sífilis. Dependiendo del tipo de prueba de sífilis que
usted elija. Se tomará una muestra de sangre de su dedo y esta
sangre se examinará para buscar la presencia de anticuerpos
contra la sífilis. La prueba DE SIFILIS rápida llamada Syphilis
Health Check utiliza los tres antígenos recombinantes altamente
específico para el organismo del Treponema Pallidum. Si la
prueba esta positiva significa que usted tiene anticuerpos contra
la sífilis. Y si hay anticuerpos contra la sífilis significa que usted
ha adquirido sífilis.

¿QUÉ DEBE SABER SOBRE LA SÍFILIS?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS)
causada por la bacteria/espiroqueta Treponema Pallidum. La sífi-
lis se transmite de persona a persona a través del contacto
sexual (Vaginal , Anal, Oral, y Madre a feto durante el embarazo)
con una persona que tiene sífilis. En la etapa inicial de infección,
chancros (llagas abiertas). Ocurren principalmente en los
genitales externos, la vagina, el ano o en el recto, pero también
pueden ocurrir en los labios y en la boca. La transmisión del
organismo ocurre A través de la vagina, ano, o sexo oral. Las
mujeres embarazadas con la enfermedad pueden transmitirla a
través de la placenta al feto .Muchas personas infectadas con
sífilis pueden no tener síntomas durante años, pero sigue en
riesgo de sufrir complicaciones más adelante si no se trata.
Aunque la transmisión ocurre por personas con chancros o
llagas que se encuentran en etapa primaria o secundaria,
muchos de estos chancros no se reconocen. Por lo tanto, La
transmisión puede ocurrir por personas que no saben o que
saben que están infectadas.

¿CÓMO PUEDE INFECTARSE DE SÍFILIS?

La sífilis se transmite a través del contacto con sangre, semen o
fluidos vaginales. El contacto puede ocurrir por relaciones
sexuales sin protection, (sin condón).También puede provenir de
la exposición a la sangre al compartir jeringas o agujas usadas.
Las mujeres embarazadas infectadas pueden transmitir la
bacteria a sus bebés durante el embarazo y parto. También es
posible infectarse con sífilis a través de una transfusión de
sangre, aunque ahora es muy poco común. Las personas no se
infectan con sífilis a través del contacto casual diario con
personas en la escuela, el trabajo, el hogar o en cualquier otro
lugar. Las personas no se infectan por comer alimentos prepara-
dos por una persona infectada con sífilis, no se han infectado
con sífilis a través de picaduras de insectos, tampoco en el
asiento del inodoro.

¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA INFECCIÓN POR SÍFILIS?

La mejor manera de evitar contrae sífilis es evitar las actividades
que te ponen a riesgo de adquirir syphilis.

- La única forma de evitar la exposición sexual a la sífilis es
tener relaciones sexuales con una persona no infectada, o
abstenerse.
- Si no está seguro de que su pareja sexual no esté infectada,
debe usar un condón correctamente cada vez que tenga
relaciones sexuales.
- No comparta agujas ni jeringas.

¿POR QUÉ DEBERÍA HACERSE UNA PRUEBA DE SÍFILIS?

Es posible que se haya infectado con sífilis y no lo sepa. Si se entera de que está infectado con sífilis, puede tomar medidas para evitar actividades que la transmitan a otras personas. Es importante averiguar si está infectado con sífilis para que pueda recibir la atención médica. Una vez infectado, genera anticuerpos que pueden durar toda la vida, ya sea que haya sido tratado o no, la prueba de Sífilis Health Check resultará positiva. Si usted sabe que estuvo previamente infectado con sífilis y recibió tratamiento o no, debe hacerse una prueba no treponémica (RPR) para determinar el nivel de anticuerpos que pueden indicar una reinfección. Es posible que la prueba de verificación de la salud de la sífilis no sea necesaria, y es importante realizar una evaluación de riesgos detallada con su médico antes de tomar la Prueba de verificación de la salud de la sífilis.

¿QUÉ DEBE SABER SOBRE SUS OPCIONES PARA LAS PRUEBAS DE SÍFILIS?

ANTICUERPO TREPONEMAL RÁPIDO DE LA VERIFICACIÓN DE LA SALUD DE LA SÍFILIS DE DIAGNOSTICO DIRECTO.

El examen puede darle un resultado rápido de la prueba de sífilis en aproximadamente 10-15 minutos. bastante rápido. La prueba es ideal para aquellas situaciones en las que la velocidad es fundamental, como en una sala de emergencias. Hay otras pruebas de sífilis disponibles si los resultados de la prueba no se necesitan de inmediato. Estas pruebas utilizarán una muestra de su sangre, pero es posible que el resultado no esté disponible hasta varios días después.

QUÉ DEBE SABER SOBRE LA SALUD DE LA SÍFILIS DE DIAGNÓSTICOS DIRECTOS

Determinación de anticuerpo contra treponema. La verificación de salud de la sífilis de Diagnostico Directo es una prueba rápida y precisa que proporciona resultados de prueba fáciles de leer en 10-15 minutos. Sífilis Health Check rápida treponémica

La prueba se usa para buscar anticuerpos en una muestra de sangre. Una vez que decida utilizar Syphilis Health Check, su proveedor de atención médica pinchará su dedo y tomar una gota de sangre para realizar la prueba mientras espera. Él o ella dará a usted los resultados de la prueba durante la misma visita. El control de salud de la sífilis es muy preciso; sin embargo, se necesitan pruebas adicionales para confirmar un resultado reactivo (positivo). Para más detalles, puede pedirle a su proveedor de atención médica que le brinde información completa sobre Prueba treponémica rápida Syphilis Health Check de Diagnostic Direct.

QUÉ DEBE SABER SOBRE LOS RESULTADOS DE SU PRUEBA DESPUÉS DE TENER EL DIAGNÓSTICO DIRECTO DE CONTROL DE SALUD DE LA SÍFILIS ¿PRUEBA RÁPIDA DE TREPONEMA?

Un resultado negativo significa que no se detectaron anticuerpos contra la sífilis en su sangre al tiempo de prueba. Sin embargo, esto no descarta por completo la posibilidad de Infección por sífilis. Si en el último mes ha tenido alguno de los contactos descrito en la sección "CÓMO PUEDE INFECTARSE DE SÍFILIS", existe la posibilidad de que aún pueda estar infectado con sífilis. Los anticuerpos para sífilis pueden no aparecer dentro de las primeras dos a cuatro semanas después del contacto. Debería estar también atento a úlceras (llagas), erupciones y otras lesiones visibles que aparecen en su cuerpo.

Pregúntele a su proveedor de atención médica si debe considerar hacerse la prueba nuevamente en los próximos 3 a 6 meses para asegurarse de que no está infectado. Sin embargo, si está seguro de que tiene no había tenido ninguno de los contactos que pudieran transmitir la sífilis en los 3 meses anteriores a su Prueba de sífilis, un resultado negativo de la prueba significa que no estaba infectado con sífilis en el tiempo de prueba. Pídale a su proveedor de atención médica que lo ayude a comprender cuál es su prueba y entender los resultados asimismo el significado para usted.

Un resultado preliminar positivo de la prueba sugiere que su sangre puede contener sífilis anticuerpos. Sin embargo, este resultado debe ser confirmado por otra prueba. Si el resultado de su prueba es positivo confirmado (infectado por sífilis), un régimen de tratamiento puede ayudarlo a mantener tu salud. Si no se trata, el organismo se esconderá dentro de las células y puede migrar a infectar otros órganos durante años. Algunas personas que dan positivo en la prueba de infección por sífilis mantenerse saludable durante muchos años. Debe informar a su médico que es sífilis positivo, para que pueda vigilar su salud de cerca. Debes tomar medidas para proteger a los demás. practicando sexo seguro.

¿DÓNDE PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SÍFILIS?

Si tiene alguna pregunta o desea información adicional, consulte a su proveedor de atención médica o comuníquese con su departamento de salud local.

